



ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ IIR



Άνετη αναπνοή
Easy breath



Επιρρίνιο έλασμα
Adjustable nose piece




3ply



Λάστιχο που δεν κουράζει
Elastic ear loops



Αδιάβροχη
Splash Resistant

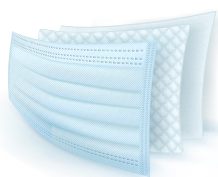

3 ply



Με earloops



Πλαστικοποιημένο
Μεταλλικό έλασμα

Μάσκες μιας χρήσης, 3ply, BFE \geq 98%. Με ελαστικά earloops και ρυθμιζόμενο επιρρίνιο έλασμα. Για χρήση από ασθενείς και άλλα άτομα για την μείωση του κινδύνου εξάπλωσης λοιμώξεων ιδιαίτερα σε καταστάσεις επιδημίας ή πανδημίας. Μάσκα Τύπου IIR σύμφωνα με το EN 14683:2019+AC:2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

1. Κρατήστε τη μάσκα μπροστά από το στόμα και τη μύτη με τέτοιο τρόπο ώστε τα λάστιχα να κρέμονται αριστερά και δεξιά της μάσκας.
2. Τοποθετήστε τη μάσκα πάνω από τη μύτη και το στόμα σας έτσι ώστε το έλασμα να πατάει στο πάνω μέρος της μύτης σας και περάστε τα λάστιχα πίσω από τα αυτιά σας. Η ανοιχτόχρωμη πλευρά να βρίσκεται εσωτερικά.
3. Εφαρμόστε προσεκτικά το έλασμαστη μύτη σας και ρυθμίστε τη μάσκα έτσι ώστε να επιτευχθεί μια σφικτή εφαρμογή στο πρόσωπό σας.



1.



2.



3.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος

17,5cm x 9,5cm

Ιατροτεχνολογικό είδος



Επιρρίνιο έλασμα



041914/1/CT



Κωδικός 041914
Συσκευασία 50τμχ



Κωδικός 041904
Display box 5*10τμχ

Συσκευασία 10τμχ