
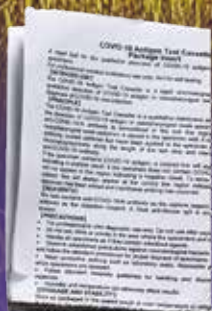


NEW
Ρινικό Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης COVID-19

TESTSEALABS[®]
Rapid Test Kit

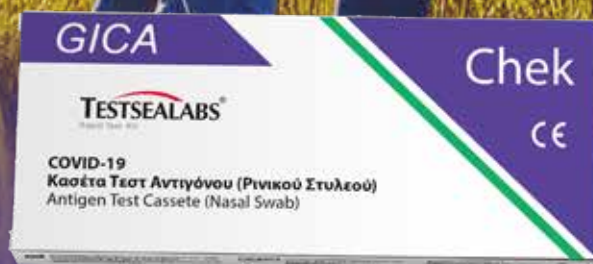

Κασέτα Τεστ Αντιγόνου (Ρινικού Στυλεού)

Το Testsealabs Τεστ Αντιγόνου COVID-19 αποτελεί ένα τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid) για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου νουκλεοκαπιδίου από τον ιό SARS-CoV-2.



99,2%


Κλινική
Εκλεκτικότητα

97,5%

Κλινική
Ευαισθησία

Τί είναι το τεστ ταχείας ανίχνευσης **Testsealabs** με μια ματιά:

Η Κασέτα Τεστ Αντιγόνου COVID-19 αποτελεί ένα τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid) για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου νουκλεοκαπιδίου από τον ιό SARS-CoV-2. Το τεστ είναι εξουσιοδοτημένο για χρήση στο σπίτι με συνταγή ιατρού, με προσωπική συλλογή απευθείας δειγμάτων οπίσθιου ρινικού επιχρίσματος (ρουθουινιών).

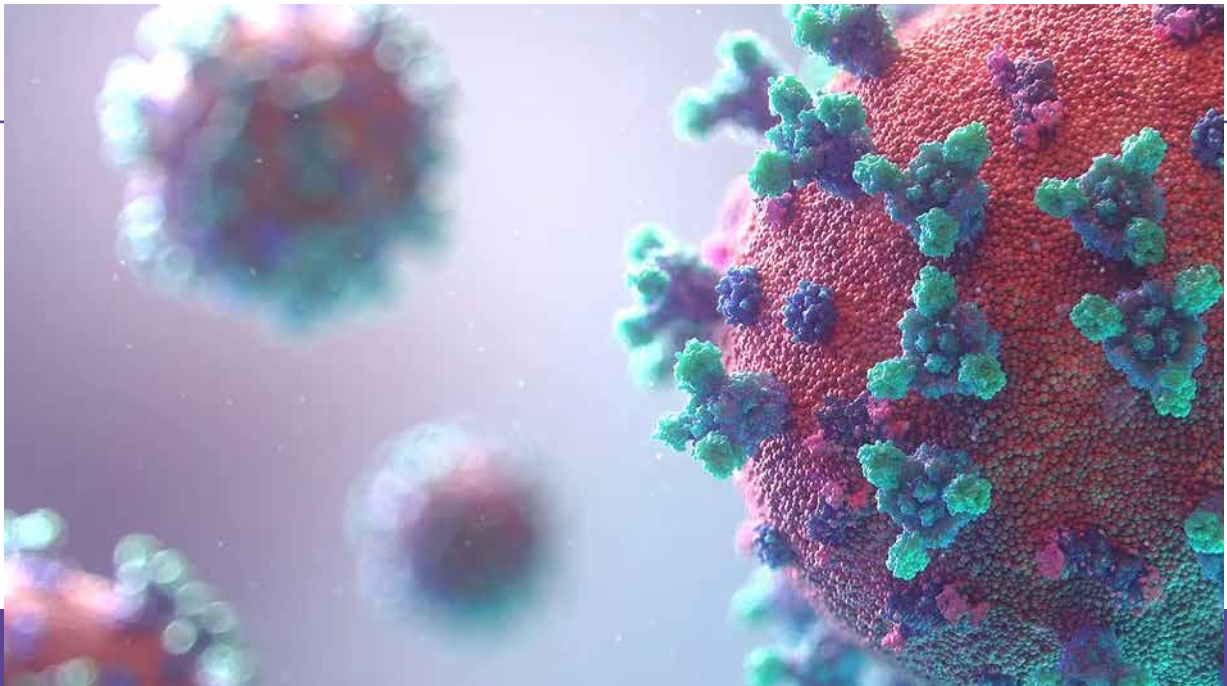


Το τεστ ταχείας ανίχνευσης **Testsealabs** kit είναι ατομικά συσκευασμένο και περιέχει :

Διαθέσιμα υλικά

- α. Συσκευή τεστ
- β. Σωληνάριο εκχύλισης
- γ. Διάλυμα εκχύλισης
- δ. Αποστειρωμένος στυλεός
- ε. Οδηγίες χρήσης

Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται

- στ. Χρονόμετρο
- ζ. Πλαστική σακούλα αποβλήτων

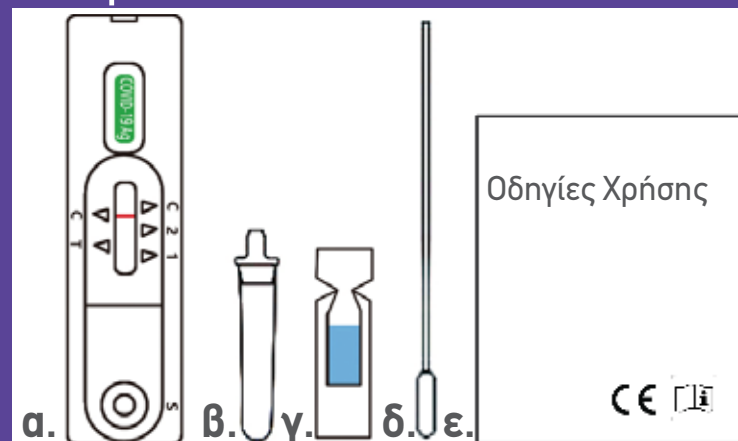

στ.



ζ.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Testsealabs:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Βήμα 1: Αδειάστε, καθαρίστε και στεγνώστε μια επίπεδη επιφάνεια.

Βήμα 2: Πλύνετε καλά τα χέρια σας για 20 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας σαπούνι και ζεστό νερό ή αντισηπτικό χεριών. Αυτό απαιτείται για να μην επιμολύνετε το κιτ του τεστ.

Βήμα 3: Ελέγξτε τα περιεχόμενα του κιτ . Βεβαιωθείτε ότι κανένα εξάρτημα δεν έχει υποστεί φθορά ή θραύση. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί φθορά, θραύση ή λείπει, μην χρησιμοποιήσετε το τεστ.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Βήμα 1. Τοποθετήστε το σφραγισμένο φιαλίδιο με το διάλυμα εκκύλισης στη τρύπα που βρίσκεται στο κουτί.

Βήμα 2. Σπάστε το άκρο του φιαλιδίου που περιέχει το διάλυμα εκκύλισης. Αφαιρέστε το πώμα του σωληναρίου εκκύλισης. Προσθέστε όλο το διάλυμα εκκύλισης μέσα στο σωληνάριο εκκύλισης.


Βήμα 3. Ανοίξτε τη συσκευασία του αποστειρωμένου στυλεού και αφαιρέστε το στυλεό. Προσέχετε να μην αγγίξετε την κεφαλή του στυλεού με το χέρι σας. Στη συνέχεια, εισαγάγετε ολόκληρο το απορροφητικό άκρο του στυλεού (συνήθως 1,5 έως 2 εκατοστά) στο αριστερό ρουθούνι. Τρίψτε σταθερά στο εσωτερικό του ρουθουνιού με κυκλικές κινήσεις, 5 ή περισσότερες φορές, για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε το στυλεό και τοποθετήστε τον στο δεξί ρουθούνι. Τρίψτε σταθερά στο εσωτερικό του ρουθουνιού με κυκλικές κινήσεις, 5 ή περισσότερες φορές, για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

Βήμα 4. Τοποθετήστε το συλλεχθέν δείγμα επιχρίσματος στο σωληνάριο εκκύλισης. Περιστρέψτε το στυλεό για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Πιέστε το άκρο του στυλεού στον πυθμένα και στα τοιχώματα του σωληναρίου εκκύλισης. Απομακρύνετε το στυλεό πιέζοντας ταυτόχρονα τα τοιχώματα του σωληναρίου εκκύλισης, ώστε να συλλεχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο υγρό από το στυλεό. Απορρίψτε τον στυλεό στα δυνητικά μολυσματικά απόβλητα.


Βήμα 5. Τοποθετήστε το πώμα του σωληναρίου εκκύλισης. Βγάλτε μια συσκευή τεστ από το περιβλημά της και τοποθετήστε την σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια. Προσθέστε 3 σταγόνες του δείγματος στην οπή δείγματος της συσκευής τεστ (S) κάθετα.

Βήμα 6. Ελέγξτε το αποτέλεσμα μετά από 10-15 λεπτά. Εάν δεν έχετε ελέγξει το αποτέλεσμα εντός 20 λεπτών ή περισσότερων, το αποτέλεσμα δεν είναι έγκυρο και προτείνεται η επανάληψη του τεστ.


Βήμα1

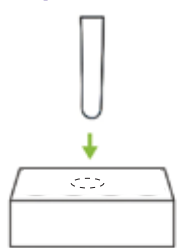


Βήμα2

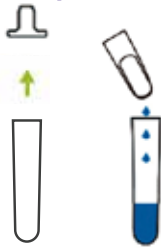


Βήμα3

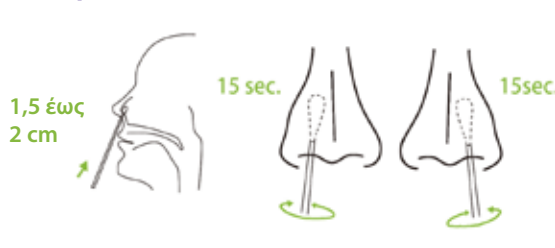

Βήμα4

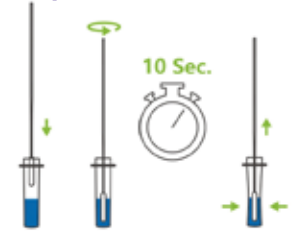


Βήμα5

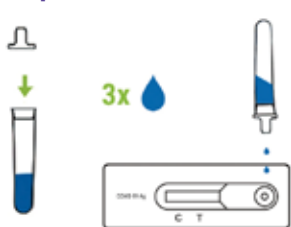


Βήμα6



ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

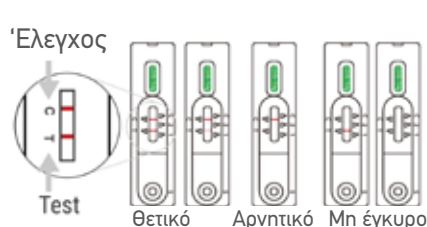

Απορρίψτε μέσα στο σάκο αποβλήτων

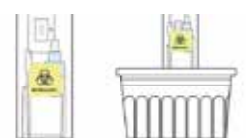

Κασέτα Τεστ Αντιγόνου (Ρινικού Στυλεού)

**Μένουμε ασφαλείς,
Προστατεύουμε τους γύρω μας!**

